

PROTECTOR FACIAL

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- PVC DE 12 MILÉSIMAS DE ESPESOR.
- BANDA ELÁSTICA DE NEOPRENO + LYCRA DE 45 CM X 2 CM EN COLOR NEGRO.
- ESPUMA CON ADHESIVO DE POLIURETANO QUE CUBRE 18 CM X 2 CM.

INSTRUCCIONES DE USO

- UTILIZA UN TRAPO LIMPIO Y SECO.
- ROCÍA UN AGENTE DESINFECTANTE.
- LIMPIA LA SUPERFICIE POR AMBOS LADOS.

COLOCACIÓN

- DOBLA SOBRE LA MARCA A 30°.
- COLOCA EL PROTECTOR EN LA FRENTE Y AJUSTA LA BANDA POR DETRÁS DE LA NUCA.



EMBALAJE.

MODELO: Z PREMIUM.

TALLA: AJUSTE MULTITALLA.

COLOR: TRANSPARENTE.


EMPAQUE: 250 PIEZAS X CAJA.

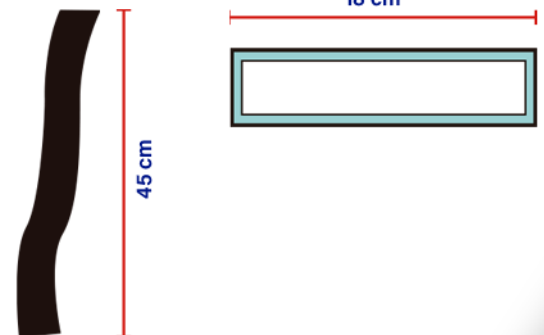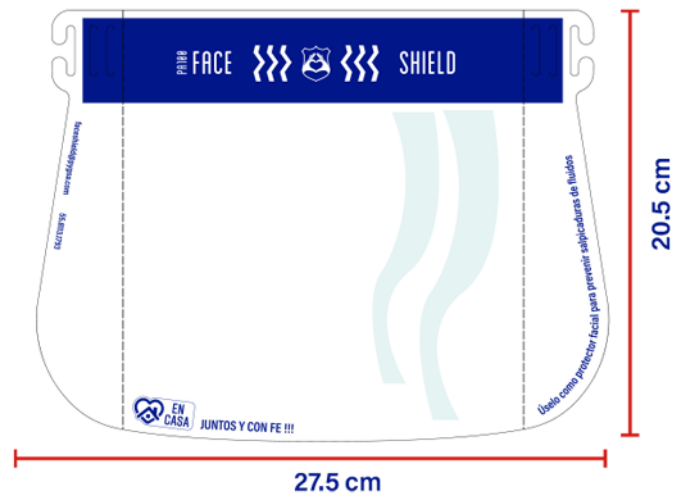

PROTECTOR FACIAL HOJA DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE MANEJO Y RESTRICCIONES.

- DESINFECTA ANTES Y DESPUÉS DE USAR.
- SEPARA LA MICA DE PVC DEL MARCO PARA DESINFECTAR DE FORMA INDIVIDUAL.
- DEBERÁS UTILIZAR CUBREBOCAS PARA INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE PROTECCIÓN.
- LAVA Y DESINFECTA CONSTANTEMENTE TUS MANOS.
- PUEDES USAR AGUA Y JABÓN PARA LAVAR EL PVC.
- NO USAR SIN PREVIA LIMPIEZA.
- NO SENTARSE O COLOCAR COSAS SOBRE EL PVC.

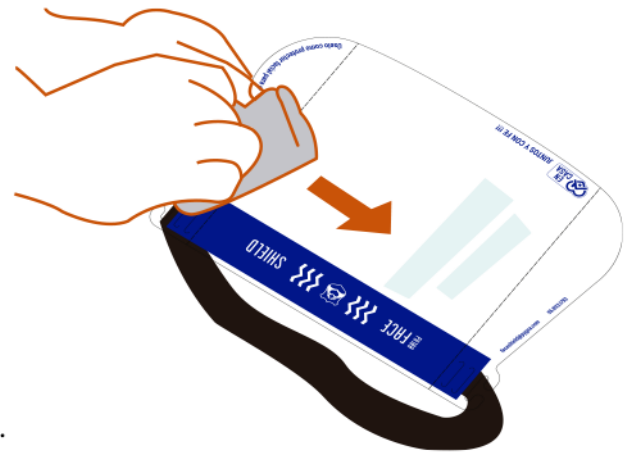

NOTA: ESTE PRODUCTO ES UN PROTECTOR FACIAL, PARA SU MAYOR SEGURIDAD, LE SUGERIMOS SEGUIR LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS.